

器 68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科材料加温器 JMDN 70720000

## なんちゃんミニ

### 【形状・構造及び原理等】

装置外観図



### 【使用目的又は効果】

本器はワックス材料を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置である。

### 【使用方法等】

操作方法または、使用方法

本機の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

### 【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 医療家以外は本器を使用しないこと。
- 2) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
  - ①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
  - ②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
  - ③外装温度が上昇するため、体が機器に触れないようにすること。
- 3) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
  - ①機器の電源を切ってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。
  - ②機器を移動させる際は、電源を切って20分以上冷ましてから行うこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器及び部品は必ず下記の定期点検を行うこと。
  - ・トレーに溜まったワックスは毎日清掃すること。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者  
デンケン・ハイデンタル株式会社  
TEL 075-574-1000
- 2) 製造業者  
デンケン・ハイデンタル株式会社